



## ברוף וויט גלו - מידע דגשים והוראות

ערכת ההלבנה של **White Glo** עושה שימוש בטכנולוגיית האור הכחול בשילוב עם ג'ל הלבנה כדי לסייע בתהליך ההלבנה של השיניים.

הנוסחה נבדקה על ידי מומחים בתחום רפואת השיניים האסתטית.

ערכת ההלבנה הביתית של **White Glo** מבוססת על טכנולוגיית LED כחולה וג'ל הלבנה מבוסס **Carbamide Peroxide**. המוצר מיועד להלבנת שיניים באופן מהיר, נוח ובטוח לשימוש ביתי, מסייע להחזרת הלובן הטבעי של השן.

הג'ל המלבין כולל את המרכיב הפעיל קרבמיד פרוקסיד שמסייע בפירוק והסרת כתמים קשים כמו כתמים מצריכת קפה, תה, עישון ועוד. טכנולוגיית ה-LED הכחולה מאיצה את פעולת ההלבנה באמצעות חדירת האור אל תוך שכבות האמייל, המאפשרת תוצאות הלבנה אפקטיביות.

### יתרונות המוצר:

1. **תוצאות מהירות ונראות לעין**: מרבית המשתמשים רואים שינוי בגוון השיניים כבר לאחר טיפול אחד.
2. **נוח לשימוש ביתי**: הערכה כוללת מגן פה שניתן לשימוש חוזר, מה שמאפשר טיפול נוח בבית ללא צורך בביקור במרפאות יקרות.
3. **בטיחות גבוהה**: המוצר מאושר על ידי משרד הבריאות ומומלץ על ידי רופאי שיניים מאוסטרליה.
4. **שימור התוצאות**: לאחר השגת התוצאה הרצויה, מומלץ להמשיך בטיפול כל 4-6 שבועות לשימור השיניים הלבנות לאורך זמן.

השימוש בערכה יכול להראות תוצאות לאחר מספר שימושים בהתאם להנחיות השימוש. יש לעיין בהוראות השימוש בעיון לפני השימוש הראשון, ולפעול לפי ההנחיות המומלצות.

הערכה בטוחה לשימוש בייתי וכוללת המלצות לשימוש זהיר, לרבות:

- **הרחיקו את הערכה מהישג ידם של ילדים.**
- **אין להשתמש בערכה עבור ילדים מתחת לגיל 12 ונשים בהריון.**
- **במקרה של רגישות, יש להפסיק את השימוש באופן זמני ולהיוועץ ברופא שיניים אם הרגישות נמשכת.**

הערכה מיועדת להעניק פתרון מהיר ונוח לשיניים לבנות מבלי הצורך בטיפולים יקרים במרפאות שיניים. עם השימוש הנכון, ניתן לשמור על תוצאות ההלבנה לאורך זמן בעזרת ביקורים סדירים אצל השיננית ושמירה על היגיינת הפה.

## הוראות שימוש:

- יש להשתמש במוצר **פעמיים ביום** למשך 10 דקות במשך שבוע אחד. במידה ויש רגישות בשיניים, ניתן להקטין את משך השימוש ל-5 דקות או לקחת יום מנוחה בין הטיפולים.
- יש לשמור על נורת ה-LED יבשה ולהימנע ממגע ישיר עם מים.

## הצהרות משפטיות:

1. **המוצר אינו תרופה** ואין להשתמש בו יותר משבועיים ברציפות ללא השגחה רפואית. יש להימנע מהסתכלות ישירה על נורת ה-LED בזמן השימוש.
2. **יש לכלול אזהרות** בנוגע לשימוש נכון במוצר ולהימנע מבליעה של הסוללות.
3. **במקרים של שאלות ובעיות רפואיות ספציפיות מומלץ להתייעץ עם הרופא המטפל לפני השימוש.**

הגעתם לחיוך המושלם והשיניים שלכם בוהקות ולבנות עכשיו חשוב לדעת איך לשמור על התוצאה לאורך זמן. חוץ מביקור סדיר אצל השיננית, תזונה מאוזנת ועשירה בסידן וטיפולי תחזוקה ביתיים עם **WHITE GLO Accelerator Kit**, הנה כמה טיפים שיעזרו לכם לשמור על השיניים הלבנות ולמנוע הופעת כתמים:

- **הימנעו ממשקאות מכתמים** - שתיית קפה, תה, יין אדום ומשקאות מוגזים יכולה לגרום להופעת כתמים על השיניים. אם אתם לא יכולים לוותר על המשקאות האלה, נסו לשתות אותם באמצעות קשית כדי להפחית את המגע עם השיניים. בנוסף, שטיפת הפה במים אחרי השתייה יכולה לעזור להסיר את השאריות המכתימות.
- **שמירה על היגיינת הפה** - צחצוח שיניים פעמיים ביום הוא חיוני לשמירה על שיניים לבנות ובריאות. השתמשו במשחת שיניים מלבינה המכילה פלואוריד להסרת כתמים ולמניעת היווצרותם. בנוסף, אל תשכחו להשתמש בחוט דנטלי כדי להסיר שאריות מזון ולמנוע הצטברות של רובד חיידקים בין השיניים.
- **הגבלת עישון** - עישון סיגריות הוא אחד הגורמים המרכזיים להופעת כתמים על השיניים. הפסקת עישון או לפחות הפחתתו יכולה לעזור לשמור על השיניים לבנות ולשפר את הבריאות הכללית של הפה.

## טיפים ועצות



הגבילו צריכה של מזון ומשקאות בצבע כהה לפני ואחרי הטיפול.



הפעילו לחץ על השפתיים במהלך הטיפול.



יחידת אור הלד אינה עמידה במים. אין להרטיב אותה. יש לשמור עליה במקום יבש וקריר.

### אזהרות:

מוצר זה אינו מיועד לשימוש כתרופה. אין לבלוע את המוצר. לא מומלץ לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל 12. המוצר אסור לשימוש לאנשים עם גשר בשיניים, קוליטיס, חניכיים לא בריאות, שורשים חשופים, כיבים או מחלה פרויחונטלית. יש להימנע ממגע ממושך של הג'ל המלבן עם החניכיים. שימוש יומיומי רצוף במשך יותר משבועיים יתבצע בהשגחה דנטלית בלבד. במקרה של בליעה, יש להגיע ללא דיחוי לחדר מיון של בית חולים. חלקים עלולים להוות סכנת חנק. אין להסתכל ישירות לתוך נורת ה-LED. אין להרטיב את מכשיר ה-LED.

### עזרה ראשונה:

לייעוץ, צרו קשר עם שירות הלקוחות של היבואן: במיפל בע"מ, גיבורי ישראל 44, נתניה, טל' שיחות לקוחות: 1-800-500-000 או פנו לרופא. במקרה של בליעת הג'ל, אין לגרום להקאה. אם הג'ל נכנס לעיניים, יש להפריד בין העפעפיים, לשטוף את העין ברציפות במים זורמים ולהמשיך לשטוף במשך 15 דקות לפחות עד לקבלת ייעוץ מהרופא. במקרה של מגע עם העור או השיער, יש להסיר את הבגד המזוהם ולשטוף את העור והשיער במים זורמים.

## הרחיקו מהישג ידם של ילדים

### אזהרות



- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. המוצר אינו צעצוע. המוצר מכיל סוללה. בליעה של הסוללה עלולה לגרום לפציעה חמורה או למוות בתוך שעותיים בלבד בשל כוויית כימיות וניקוב אפשרי של הוושט. במקרה של בליעה, יש להגיע ללא דיחוי לחדר מיון של בית חולים. יש להשליך מייד סוללות משומשות.
- חלקים עלולים להוות סכנת חנק.
- קיים סיכון לפציעה בשל שריפה, פיצוץ או דליפה. אין לפרק, לטעון, למחוץ או לחשוף לאש או לטמפרטורות גבוהות.
- אין להסתכל ישירות לתוך נורת ה-LED.
- אין להרטיב את מכשיר ה-LED.
- יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש בפעם הראשונה.

## יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש




שלב 4

הכניסו את הסד לתוך הפה והדליקו את נורת הליד.




שלב 3

מרחו ג'ל הלבנה בחלק העליון והתחתון של הסד.

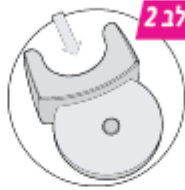

שלב 2

חברו את הסד ליחידת האור הכחול.

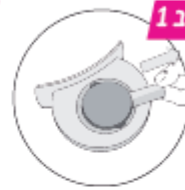

שלב 1

פתחו את כיסוי הסוללות שעל יחידת האור הכחול והוציאו את מגן הפלסטיק.



שלב 8

תיהנו מחיוך לבן ובהיר יותר.



שלב 7

הסירו את הסד מיחידת אור הליד ושטפו אותו היטב.



שלב 6

שטפו היטב במים חמים.



שלב 5

הירגעו ותנו לתהליך ההלבנה לעשות את העבודה. האור יכבה אוטומטית לאחר 10 דקות.



אל תשכחו להשוות ולתעד את צבע השיניים שלכם לפני ואחרי הטיפול בעזרת סרגל הגוונים המקצועי.

